



## Paingone Plus -smärtpenna Medicinfri, snabb och lokal smärtvård

Paingone Plus är en TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) elakupunkturpenna, som är ämnad för snabb och effektiv vård av lokal smärta. Batteridrivna Paingone Plus fungerar automatiskt med att producera elimpulser som aktiverar nervbanorna.

### Enkel och effektiv smärtvård

Paingone Plus är liten, lätt och effektiv. Apparaten fungerar med samma princip som andra TENS-smärtvårdsapparater, men den ger punktaktiga elimpulser. Apparaten används verkligen lätt. Tack vare sin storlek åker Paingone med i fickan eller handväskan och man kan göra vården när och var som helst. Med Paingone Plus kan man även göra vården genom kläder, vilket är behändigt och som sänker på tröskeln att använda smärtpennan. Vården inverkar omedelbart. Smärtekänslan kan lätta redan efter första vårdgången.

### Regelbunden vård är viktig

Vårdapparaten ända riktas rakt på smärtstället. Vårdtiden är 30 sekunder på ett vårdställe och vårdrekommendationen är 4-5 gånger per dag. Man kan även röra på apparaten under vården, vilket kan kännas bättre än att ge vård bara på ett ställe. I fall smärtstället är omfattande, kan vården riktas på akupunkturpunkterna för att få en mera omfattande inverkan.

Med Paingone Plus kan man vårda olika lokala smärtor. Man har fått bra vårdresultat med apparaten t.ex. i vård av tennisarmbåge och knäsmärtor. Vården verkar även på problem på fotsulaområdet, som t.ex. plantarfascit och hälsporre. Eftersom apparatens användning är lätt, är det även lätt att ge regelbunden vård. Endast regelbunden vård ger bra vårdresultat. Det finns ingen risk för överdos utan man kan alltid vid behov och enligt egen kännedom använda apparaten.

Paingone Plus är en CE märkt medicinsk apparat.



## Kontraindikationer

Paingone Plus pennan har samma kontraindikationer som andra traditionella TENS-apparater.

Apparaten skall inte användas :

- om du har pace maker eller du lider av rytmstörningar i hjärtat
- om du har epilepsi
- under de första 16 graviditetsveckorna
- av barn under 10 år

## Vården skall inte riktas på

- struphuvud- eller svalgmuskelområdet
- rakt på hjärtat
- öppna sår
- ögon eller runt ögonen
- våt hud
- metallimplant
- halspulsådern

### Paingone Plus

Storlek	149 mm x 40 mm
Batteri	ja batteridrivnen 1 st AAA
Livslängd	i daglig användning ca 2 år
Medicinsk apparat	ja

## Apparatförpackningen innehåller

- 1 x Paingone Plus -apparat
- 1 x finskspråkig bruksanvisning
- 1 x AAA-batteri

